

Secutape 3+, fikseringstape



adCARE

Din urologi spesialist.

- **Hva bør fikseres:**
Permanente katetre, suprapupisk kateter, nefrostomi, uridomer, alle typer urinposer, PEG sentralt vene kateter, infusjonskatetre sårdren m.m.
- **Hvorfor er det viktig å fikserer:**
For å unngå drag i kateter/ slangesystemet. Kan bidra til å unngå skader i urinrøret og blæren.
- **Hvordan bruke Secutape 3+:**
Teipen kommer med børrelås.
Kan åpnes og lukkes opptil flere ganger.
Posisjonen på kateteret kan endres uten å skifte tapen hver gang.
- **Hvor lenge kan Secutape 3+ sitte på huden:**
Opptil 7 dager.
- **Kan fikseringen dusjes med:** Ja.
- **Er Secutape skånsom mot huden:**
Ja. Fikseringstapen er pustende og i svært hudvennlig materiale som bidrar til mindre hudreaksjoner. Secutape er hypoallergen og medisinsk sikker.
- **Hvordan får jeg tak på Secutape 3+:**
Hos bandagist og apotek. Tapen er på refusjon.
Vnr 810775.

Hvordan fiksere?

- Fest kateteret eller slangen slik at fri drenerasje sikres ved alle kroppsstillinger. Slik at knekk og strekk på kateter ikke oppstår.
- Festes på skrå mot lysken/ hoftekammen

Hva er Secutape 3+ laget av?

- Nonwoven og hudvennlig akryl i kleberen.
- Inneholder ikke løsemidler, latex eller PVC

