


LECS

Bruker-veiledning

1. Plasser Foley-kateteret i Y-svingende kateterholder, med ballongens oppblåingsarm vekk fra klemhengselen.
2. Lukk den Y-svingende holderen ved å plassere fingrene under lappen, og sikre begge klemmer med tomlene. Pass på å ikke klemme kateteret.
3. Finn riktig festepunkt ved å legge LECS -enheten rett på låret, og følg oppreist retning på lappen (Venstre ben eller Høyre ben) og hold riktig ben helt utstrakt. Når området er identifisert, legg LECS II-enheten til siden.
4. Rens og avfett festepunktet, samt det omkringliggende området, med alkohol eller andre lokale desinfiserings- og rengjøringsprotokoller. La huden tørke.
5. Påfør den medfølgende hudbeskytteren med pads i retning av hårvæksten, og påfør beskytteren på et område større enn festepunktet. La tørke helt (10-20 sekunder).
6. Bruk en permanent markør for å skrive datoen for administrasjon på LECS -enhetens pad og initialer.
7. **MERK:** Sett alltid kateteret inn i LECS Stabiliseringsenhetens Y-svingende kateterholder før du påfører klebepadden på huden.
8. Juster LECS -enheten over festepunktet med 3 cm kateterslakk mellom innsatsområdet og Y-svingende kateterholder, mens pasientens ben er helt utstrakt.
9. Mens du holder den Y-svingende kateterholderen for å holde padden på plass, fjern beskyttelsen på klebemiddelet og plasser den klebrige siden ned på huden, pass på å holde klebemiddelet stramt og glatte ut eventuelle rynker.

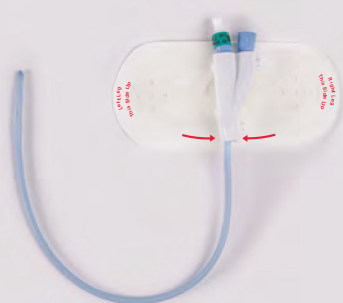

Instruksjoner for fjerning av LECS I

Fjerning av kateter::

1. Åpne kateterholderen ved å trykke og klemme festeklemmene med tomlene, løft forsiktig for å åpne.
2. Fjern forsiktig Foley-kateteret fra LECS stabiliseringsenheten, og kast det riktig.

Fjerning av tape:

LECS har et svært sterkt hypoallergenisk klebemiddel; det er viktig at det fjernes forsiktig og riktig.

1. Bruk alkoholpads og gni forsiktig kanten av LECS-klebepadden til hjørnene løfter seg.
2. Fortsett å stryke undersiden av padden frem og tilbake, og slipp alkohol for å løse opp klebepadden og fjerne den fra huden.

IKKE BRUK KRAFT FOR Å LØSNE/FJERNE